

機械器具 80 はり又はきゆう用器具
管理医療機器 滅菌済み鍼 JMDNコード 34175000

セイリン鍼 KBタイプ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 刺入の深さは、鍼長の1/3以上残して刺入してください。
No01(φ0.14mm)以下の鍼を使用する場合は、鍼長の1/2以上残して刺入してください。*
- 原則禁忌
次の患者には適用しないことを原則とするが、特に必要な場合には慎重に適用すること。
妊婦、救急事態もしくは手術を必要とする場合、悪性腫瘍、出血性疾患、ステンレス成分に対する金属アレルギーのある患者。

【形状・構造及び原理等】

<各部の名称>

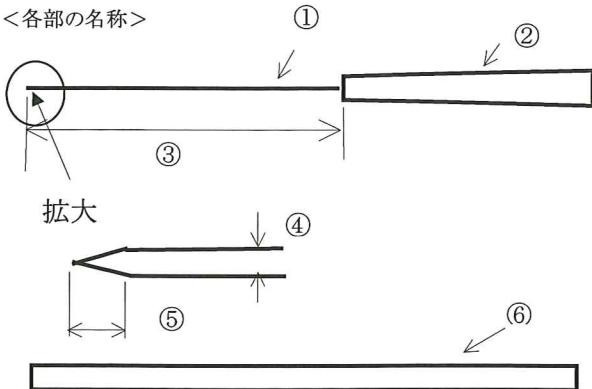

	構造名称
①	鍼体(ステンレス鋼線)
②	鍼柄
③	鍼長
④	線径
⑤	鍼尖
⑥	鍼管

線径 (φ mm)	呼称	針長(mm)			
		75	90	120	150
0.20	No.3	○	○	○	○
0.25	No.5	○	○	○	○
0.30	No.8	○	○	○	○
0.35	No.10	○	○	○	○

【使用目的、効能又は効果】

本製品は鍼灸治療に用いられる器具であり、外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため末梢神経を刺激する細長く先の尖った滅菌済み毫鍼であって、JIS T 9301:2005 単回使用ごうしんに適合するものである。

【品目仕様等】

鍼体の公称線径に応じ、鍼体の中心軸方向に力を加えた時、鍼体は鍼柄から引き抜けてはいけない

【操作方法又は使用方法等】

- 滅菌済みにつき、包装開封後直ちに1回限り使用する。
- 3)刺入部位の皮膚を消毒する。
- 4)ブリスター包装を開封し、鍼を取り出す。(鍼管付のものは、鍼管と鍼柄の接合部分を分離し、鍼を鍼管から取り出さずに刺入部位に鍼管を当てる)

- 1)鍼を刺入し刺激を与える。(鍼管付のものは、鍼管からのぞいている鍼柄を軽くたいたいで切皮し、鍼管をはずした後、鍼を刺入する)
- 2)治療後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。*

【使用上の注意】

<重要な基本的事項>

- 表示されている使用期限までに使用してください。使用期限の過ぎた鍼は使用しないでください。*
- 使用は1回限りとし再使用、再滅菌はしないで下さい。*
- 他社製の鍼管を使用した場合、無菌に対する保証ができなくなります。ご注意ください。*
- 鍼体はステンレス鋼線を使用しています。特にニッケル、クロム等のステンレス成分に対する金属アレルギーのある患者様に対しては使用しないでください。
- 個別包装により、無菌が保たれています。包装がすでに破損、汚損又は水濡れしていた場合は、使用しないでください。*
- ご使用前に、鍼を点検してください。湾曲や損傷等、鍼に異常のある場合には使用しないでください。*
- 鍼を刺入する部位はアルコール綿等でよく清拭し、刺入してください。
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。
- 包装開封後に鍼を使用しなかった場合は無菌保証が出来なくなります。開封後使わなかった鍼は使用せず廃棄してください。*
- 切皮後、鍼管を抜く時に鍼が皮膚から抜けることがあります。鍼管を抜く時はご注意ください。*
- 鍼体はステンレス鋼線を使用しています。金属強度以上の捻鍼または、回旋により折鍼が起こる場合があります。ご注意ください。*
- 施術時鍼体に触れる場合は感染防止に留意し、直接素手で鍼体に触れないでください。*
- 筋肉部への治療では、極度の筋硬直により、折鍼の危険があります。No.2(φ0.18mm)以上の太い鍼をご使用ください。患者様の緊張を取り除き、咳などにも注意しながら施術してください。
- 刺入した鍼が抜けなくなった時は、無理に抜かず、筋を弛緩させるなどの処置を行い、ゆっくりと真直ぐに抜いてください。抜鍼時に鍼を曲げたり、ヒネリなどの力をかけたまま引き抜くと折鍼の危険があります。
- 灸頭鍼には金属鍼柄をお使いください。また、灸灸に当たっては局所の火傷の防止に注意してください。
- 灸頭鍼を行う時は、鍼体に灸をあてないでください。鍼体が曲る場合があります。
- 通電に適した鍼ではありません。通電で生じた事故についての責任は負えませんので、ご注意ください。*

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

- 水ぬれ、直射日光、高温多湿及び化学物質で汚染される可能性のある場所を避けて保管してください。

<製造番号又は製造記号>

- 製造番号は外箱に記載

<有効期間・使用の期限>

- 使用期限は外箱に記載(自己認証による)

【包装】

100本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: セイリン株式会社

住 所: 〒424-0037

静岡県静岡市清水区袖町 1007-1

電話番号: 054-365-5700

製造業者: セイリン株式会社 本社工場